

WISE THERMO CONTROLLER 【Install Manual】



OFFICE
W I S E
株式会社 オフィスワイズ

1.インストール環境

【注意事項】

社内のシステム担当者の方と下記内容のご確認をお願いします。

サーモグラフィーカメラ専用のコンピューターの使用を推奨しています。

<インストール・ご使用にあたり>

本製品のインストール・ご使用の際は、Administrator(コンピュータの管理者)権限を有するユーザーで操作する必要があります。初期設定（デバイスの追加）の際、事前にセキュリティソフトを無効化の上、再起動をしておく必要があります。

また、既にネットワークに接続している場合、全ての接続を無効にする必要があります。

■ 下記の条件を満たしているコンピューターをご用意ください

※スペック不足のコンピューターの場合は、通常に作動しない可能性がございます

・制御ソフト「WISE THERMO CONTROLLER 2.0」（顔認識機能）使用の場合

OS	Windows 10 64bit版 / 32bit版
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5 (2.7GHz) 以上
RAM	4GB 以上

・制御ソフト「WISE THERMO CONTROLLER 1.0」使用の場合

OS	Windows 10 64bit版 / 32bit版
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3 (2.0GHz) 以上
RAM	2GB 以上

2.インストール操作

【注意】

最初に、サーモグラフィーカメラ本体（以下、デバイス）に、LANケーブルとACアダプターを接続しデバイスとコンピューターを接続して、コンピューターの電源を入れてください。

●方法：1 《ステップ1》

ネットワーク設定からPCのIPアドレスを変更してください。

「①Windowsの設定」 > 「②ネットワークとインターネット」 >

「③接続プロパティの変更」 > 「④IP設定の編集」で、下記記載の


<A> → → <C> → <D> → <E> の順番に、内容を変更し「保存」を押してください。

※上記②・③が表示されない場合は、別方法になりますので、次項にお進みください

■ 「①Windowsの設定」



■ 「②ネットワークとインターネット」

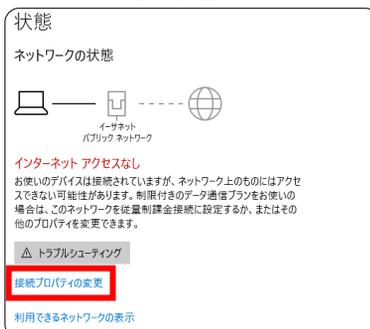


■ 「③接続プロパティの変更」



※「手動」 > 「IPv4・オン」に変更してください

※上記②・③が表示されない場合は、次項にお進みください

■ 「④IP設定の編集」

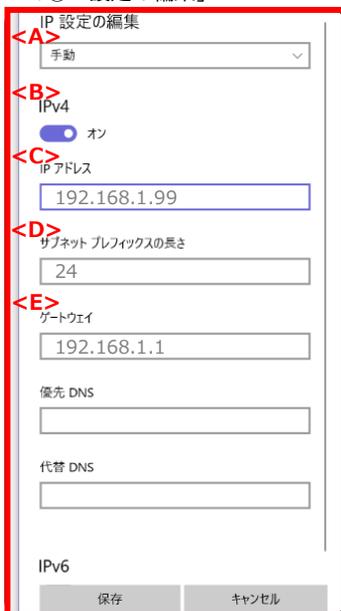

- | | |
|---------------------|--------------------|
| <A> 自動 (DHCP) | : → 「手動」 |
| IPv4・オフ | : → 「オン」 |
| <C> IPアドレス | : → 「192.168.1.99」 |
| <D> サブネットプレフィックスの長さ | : → 「24」 |
| <E> ゲートウェイ | : → 「192.168.1.1」 |

入力完了後「保存」をクリックして、入力内容を確定してください。
※優先DNS、代替DNSに数字が入っている場合削除してください。

1 準備


●方法：2《ステップ1》※前項の方法で設定が完了できなかった場合は、下記方法をお試しください

始めに、LANケーブルと電源をデバイスに接続、デバイスとPCを接続します。
接続後の手順は「①Windowsの設定」>「②ネットワークとインターネット」>「③イーサネット」>
「④ネットワークと共有センター」>「⑤イーサネットの状態」>「⑥プロパティ」>
「⑦インターネット プロトкол バージョン4(TCP/IPv4)」をダブルクリックし
下記記載の<A>→→<C>→<D>の順番に、変更し「OK」を押してください。

■ 「①Windowsの設定」



■ 「②ネットワークとインターネット」

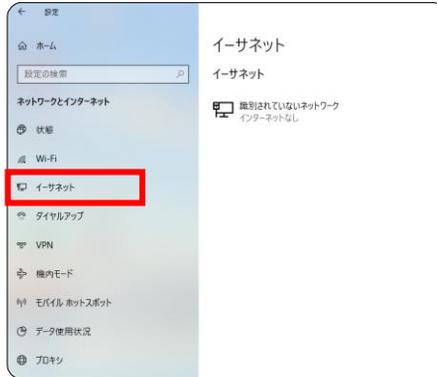


■ 「③イーサネット」




■ 「④ネットワークと共有センター」




■ 「⑤イーサネットの状態」

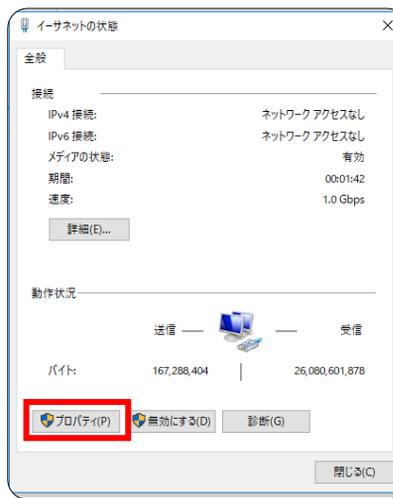

■ 「⑥プロパティ」

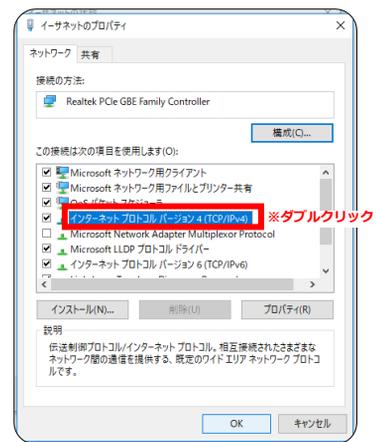

■ 「⑦インターネット プロトкол バージョン4(TCP/IPv4)」

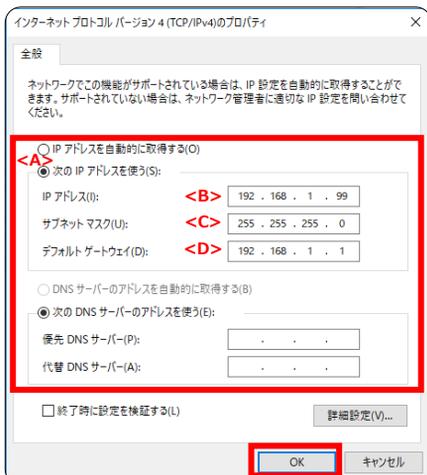

<A> IPアドレスを自動的に取得する(O) : → 「次のIPアドレスを使う(S)」

 IPアドレス : → 「192.168.1.99」

<C> サブネットマスク : → 「255.255.255.0」

<D> デフォルトゲートウェイ : → 「192.168.1.1」

入力完了後「OK」をクリックして、入力内容を確定してください。
※優先DNS、代替DNSに数字が入っている場合削除してください。


《ステップ2》

該当の制御ソフト「WISE_THERMO_CONTROLLER」をインストールします。
下記手順に従ってインストールしてください。

手順1：インストールの言語設定を行います。


「English」を選択して「OK」をクリックしてください。

■手順1

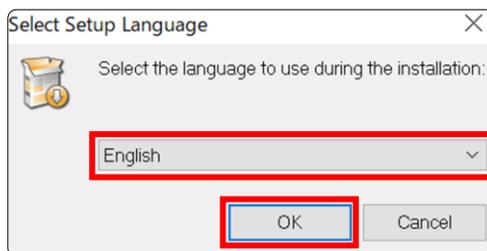


手順2：「Next」をクリックして次へお進みください。

■手順2

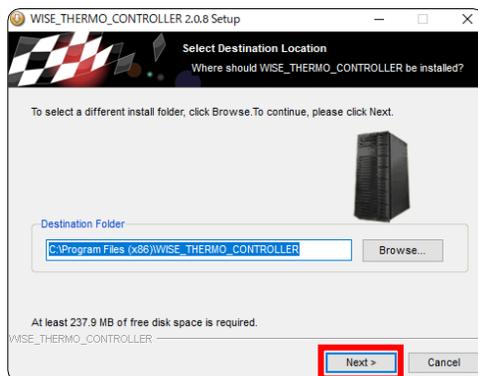


手順3：「Next」をクリックして次へお進みください。

■手順3

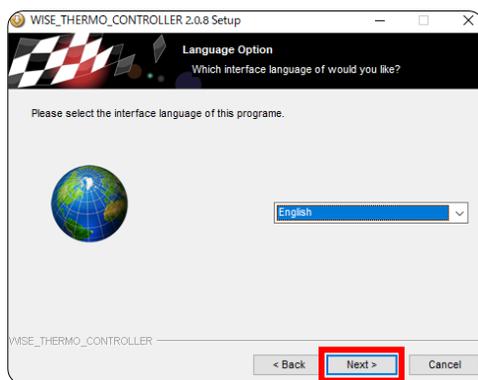


手順4：「Install」をクリックして次へお進みください。

■手順4

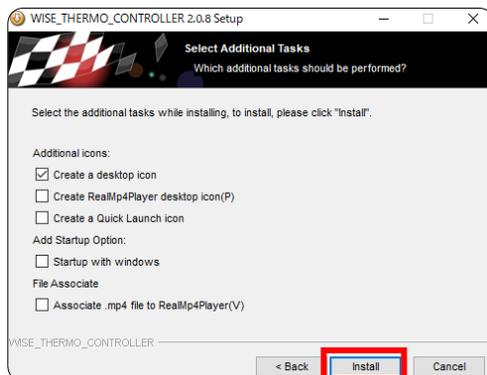


手順5：インストールが開始されますので、少々お待ちください。

■手順5

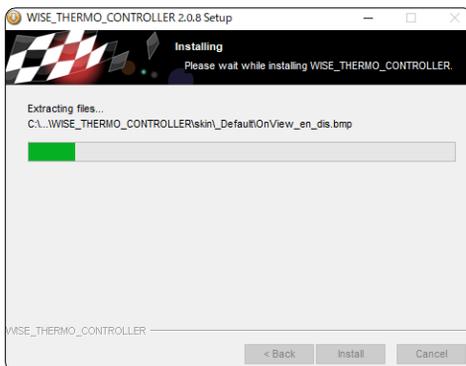

手順6：インストールが完了すると、下記画面が表示されます。
「Finish」を選択し、セットアップを完了させてください。

■手順6
「Finish」
インストール完了

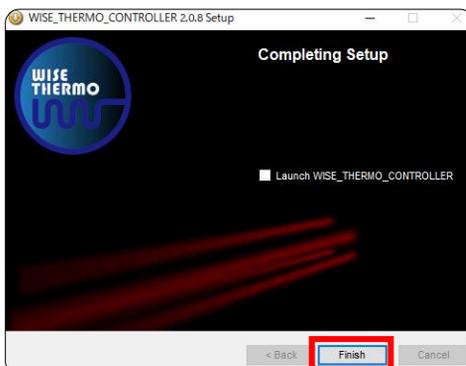

3. WISE_THERMO_CONTROLLERを起動

制御ソフト「WISE_THERMO_CONTROLLER」を起動します。
正常に起動すると、次のようなログイン画面が表示されます。

■アイコン
(デスクトップ上)



■ログイン画面(ソフト終了時)



<ユーザー名>
<パスワード>

admin
※入力無し


1. デバイスの追加（自動追加）

デバイスとコンピューターを接続した状態で、デバイスの登録を行います。

●方法：1

《ステップ1》

メイン画面で「Devices」をクリックします。

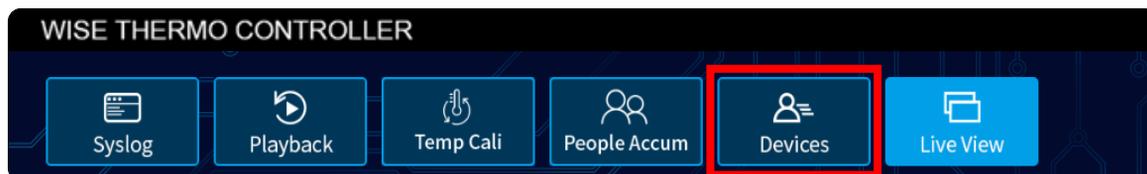


《ステップ2》


下記画面でIPアドレスが表示されましたら、**自動で追加（正常追加表示）**されています。追加が確認できましたら「×」で画面を閉じてください。

※IPアドレスは、下記の「デフォルトIPアドレス一覧」をご参照ください

* 正常追加表示 *

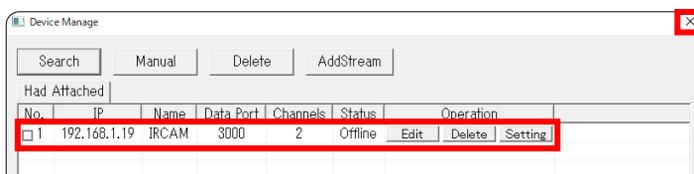

※上記が表示されない場合は、追加されておりません。
別方法での追加作業になりますので、次項（方法：2）をお試しください。

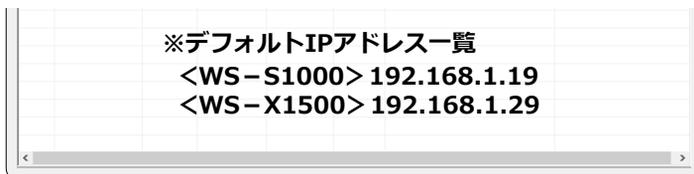

《ステップ3》

メイン画面でモニターする映像の選択を行います。

メイン画面で「①DevList」をクリックして、「②Default Project」>「③Default Group」>「④IRCAM」の順番でダブルクリックして、「⑤Camera」をクリックすると映像が表示されます。




●方法：2 ※前項の方法で設定が完了できなかった場合は、こちらの方法をお試しください。

《ステップ1》

前項同様「Devices」をクリックして頂き、「Search」をクリックしてください。

■「Devices」の表示

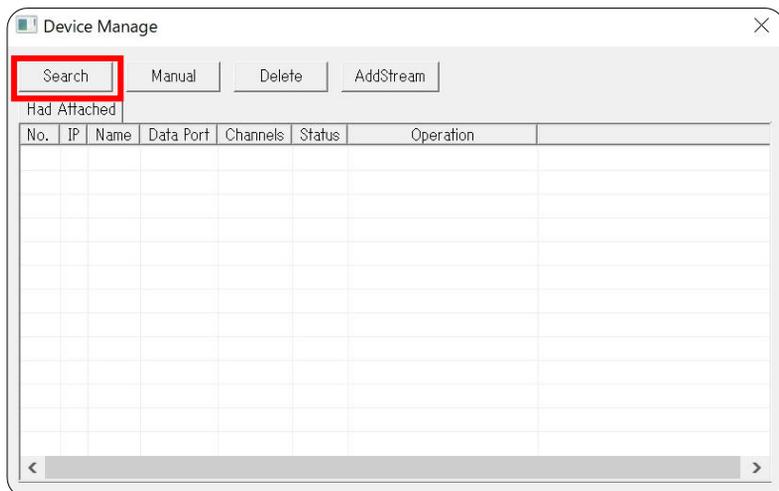


《ステップ2》

表示されたIPアドレスを選択し、「Add」をクリックしてください。

正常追加された場合は、P.6の*正常追加表示*画面が表示されます。

※IPアドレスは、下記の「デフォルトIPアドレス一覧」をご参照ください

■「Search」

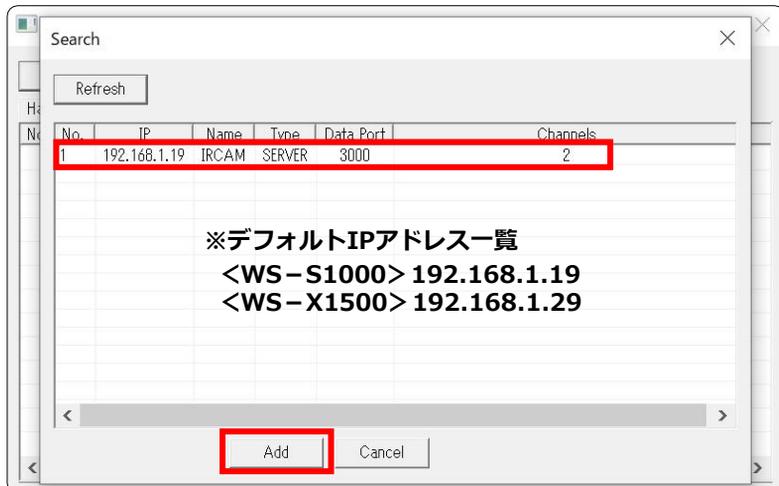

※自動追加されない場合は、エラーメッセージが表示されます。
 再度別方法での追加作業になりますので、次項をお試しください。


2.デバイスの追加（手動追加）

※自動で追加されない場合のみお試しください

《ステップ1》

- 「Devices」 > 「Manual」 をクリックすると、入力画面が出てきます

■ 「Devices」 > 「Manual」

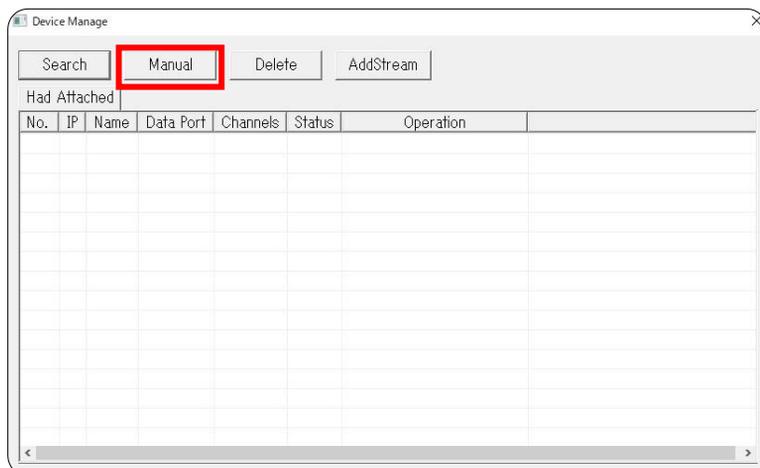

《ステップ2》

- 「Server Name & Server Addr」には、『デフォルトIPアドレス』を
 - 「Username & Password」には、『888888』を入力し、「OK」ボタンをクリックください。
- 正常追加された場合は、P.6の*正常追加表示*画面が表示されます。
 ※IPアドレスは、下記の「デフォルトIPアドレス一覧」をご参照ください

■ 「Manual」 入力画面

<サーバー名>	デフォルトIPアドレス
<サーバーアドレス>	デフォルトIPアドレス
<サーバーポート>	3000（変更なし）
<ユーザー>	888888
<パスワード>	888888

※デフォルトIPアドレス一覧

<WS-S1000>	192.168.1.19
<WS-X1500>	192.168.1.29

※自動追加されない場合は、エラーメッセージが表示されます。

上記手順で追加されない場合は、PCのスペックが不足しているか手順が異なっているもしくはコネクタが接続されていない等の可能性がございます。

3.エラーアラーム警告に関して



デバイスの追加後に、アラーム（アラーム音は、PCから出ます）警報が、続いて作動している場合はシステム上のエラーアラームが警告されています。原因は、ストレージ設定の不具合で保存されるデータ先を「Cドライブ」に変更する必要があります。

※異常体表温者のアラーム警報のデフォルト設定は、37.3℃にしておりますので37.3℃以内でアラームが鳴り続けている場合は、システムのエラーアラームとなりますので下記の手順をお試しください。

■エラーアラーム警報画面事例



メイン画面の右上にある「① 」をクリックして、「②System」>「③System Setup」>「④Recording Disk」>「⑤Cドライブ」に変更し「⑥OK」を押してください。

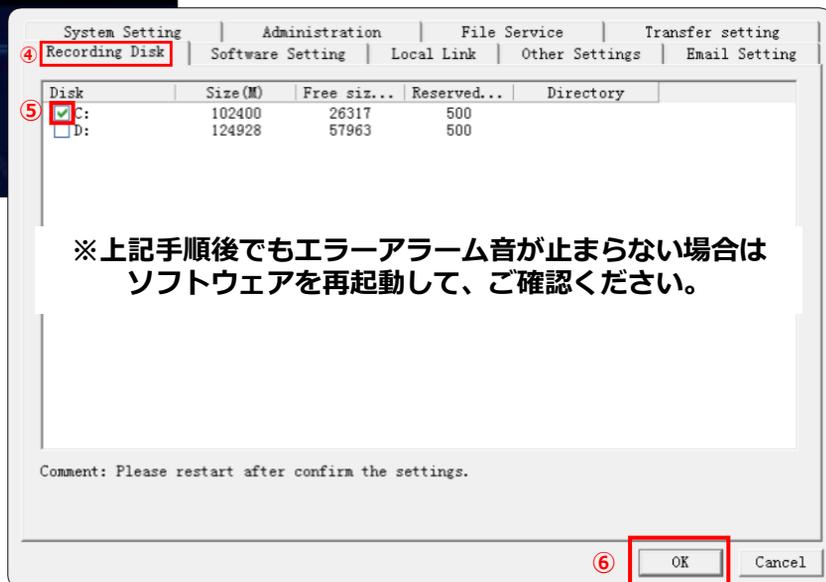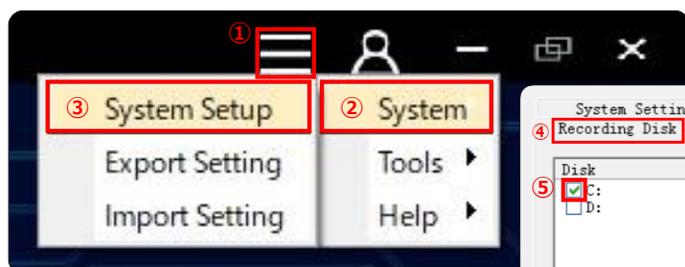

以降の使用方法は、別紙の
【WISE THERMO CONTROLLER】 Operation Manual
 に沿って、ご使用くださいませ。

